

# РАНЫ

(плохо заживающие  
и трофические язвы)


КУРС ЛЕЧЕНИЯ:

до 30 мин ежедневно, до заживления

противовоспалительный и регенераторный эффекты,  
улучшение местного кровообращения

**+** облучение раны  
и прилегающих на 1-2 см участков

Размер пятна

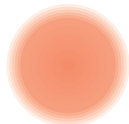

12 - 15 мм



Время  
экспозиции пятна

от 5 до 10 мин



Пораженную поверхность необходимо очистить  
от гнойных выделений. Для этого можно использовать,  
например, перекись водорода.

Облучение следует проводить от краев к центру.